

**Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros
LACEN / SES / GO**

Programa de Controle da Malária

ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DE LAMINAS

1. As lâminas deverão ser enviadas, acompanhadas do formulário específico do LACEN, preenchido corretamente (modelo acima);
2. O formulário, juntamente com as lâminas, deverá ser entregue no setor de coleta do LACEN;
3. Enviar mensalmente todas as lâminas positivas e 10 % do total de lâminas negativas;
4. Embrulhar cada lâmina em papel absorvente (higiênico) de forma que não haja atrito entre elas. Formar pequenos pacotes e colocá-los, de preferência, em uma caixinha de isopor ou frasco para que não se quebrem durante o transporte. Etiquetar com o destinatário: "LACEN: Aos cuidados da seção de Imunoparasitologia" e com a frase " CUIDADO FRÁGIL";
5. As lâminas com divergências entre o LACEN e o laboratório de origem, permanecerão arquivadas para futuras consultas;
6. A gota espessa é o método de escolha para o diagnóstico da malária, devido a sua maior sensibilidade. Posteriormente, em caso de dúvidas, o esfregaço poderá ser realizado para melhor identificação das formas encontradas;
7. A quantificação dos parasitos, preferencialmente, deverá ser feita em milímetros cúbicos (mm^3) devido a maior precisão que esta contagem oferece;
8. Anotar sempre no formulário de envio ao LACEN o lote, a validade e a procedência do corante utilizado.

Quaisquer dúvidas entrar em contato com o técnico Félix Martins (seção de Imunoparasitologia) pelo telefone (62) 3201-9647 ou com Angélica Acioli (chefe da seção de Imunoparasitologia) pelo telefone (62) 3201-9669.